

## KING JIM

イヤホンで音楽を聴いているような自然な見た目の

## 集音器 AM10

### 取扱説明書

〔セット内容の確認〕
AM10本体／イヤピース(XS,S,M,L)／ポーチ／簡単マニュアル／取扱説明書(保証書付)

このたびは、集音器 AM10をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書は保証書を兼ねています。保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受取りください。

本製品は、難聴の方に向けた聞こえの改善を目的とした製品(補聴器)ではありません。

- 本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
- 聞こえ方には個人差があり、使用者によって効果が表れにくい場合もあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水や液体などで濡らさないでください。
- 本製品は、日本国内専用です。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。
- 製品改良の為、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- キングジム、KING JIM、aremaは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。eneloop(エネルーブ)は、パナソニックグループの登録商標です。

保証書	
製品名	集音器
品番	AM10
保証期間	本体お買い上げ日より1ヶ年
	お買い上げ日 年 月 日
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店名	

#### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。当社が無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼しなれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。

- 保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。
  - (1)使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障及び損傷
  - (2)お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、圧力等による故障及び損傷
  - (3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び損傷
  - (4)本保証書の提示がない場合
  - (5)本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 同梱品の保証はしておりません。取扱店にてお買い求めください。
- 保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様が製品を使用することによって発生した間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益、および得べかりし利益の喪失等に対して、当社は一切の責任を負わず、また製品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### アフターサービス

#### 保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

#### 修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときはご要望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、当社の都合により代替品に交換することで修理に変えさせていただく場合がございます。

#### お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、キングジム商品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

#### 株式会社キングジム

〒101-0031東京都千代田区東神田二丁目10番18号

https://www.kingjim.co.jp/

フリーダイヤル(全国共通)	ネットクのパートナー
<b>お客様相談室 ☎0120-79-8107</b>	
FAXからの場合	0120-79-8102
携帯電話からの場合	0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間：平日(月～金曜日)	午前9:00～午後5:30



**アンケート実施中**

**http://kj-q.com**

抽選で謝礼を差し上げます

※接続料・通信料はお客様負担となります。

## 安全上のご注意

**必ずお守りください!**

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

表示された指示内容を守らずに、誤った使いかたによって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

### ⚠危険

この表示を守らずに、誤った使いかたをすと、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。

### ⚠警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすと、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

### ⚠注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすと、「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

🚫 してはいけない「禁止」の内容です。

🔔 必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

### 電池についての注意

指定電池	単4形アルカリ乾電池 または 単4形エネルギー
------	-------------------------

#### ⚠危険

- 🔔 電池の内容液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずにすぐ水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。

#### ⚠警告

- 🔔 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となります。電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しくお使いください。
- 🔔 長時間本製品を使わない場合や、電池を使い切った場合は、本製品から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本製品を破損させるおそれがあります。
- 🔔 電池の内容液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに多量の水水道水などのきれいな水で洗い流してください。
- 🔔 電池はお子様ที่飲み込まないように、手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 🚫 電池は火の中に入れたり、加熱、分解、改造をしないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 🔔 電池は極性通りに入れてください。間違った極性で入れた場合、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本製品を破損させるおそれがあります。
- 🔔 エネルーブを使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

### 本体についての注意

#### ⚠警告

- 🚫 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 🚫 濡れた状態の手や機械に水がかかる場所(風呂場や台所など)で使用しないでください。内部に水が入り、感電・火災・故障の原因となります。
- 🔔 本製品、イヤピース、電池は幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 🚫 異常な音、煙、発熱、異臭、変色するなどがある場合は、直ちに本製品の電源を切ってください。
- 🚫 強い衝撃を与えないでください。
- 🚫 直接日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。

### ⚠注意

- 🔔 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間続けて使用すると聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 🔔 はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷める場合がありますので、徐々に音量を上げるようにしてください。
- 🔔 購入前に病院で聴力測定をしてください。使いかたが不適切な場合、耳を傷める原因となります。
- 🔔 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 🔔 肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 🔔 イヤホンを耳から外したときは必ずイヤピースが本体についているかご確認ください。イヤピースが耳の中に残り取り出せない場合はすぐに医師の診察を受けてください。
- 🔔 本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じる場合があります。その場合は一旦使用を中止してください。
- 🔔 万一、本製品または本製品の一部分が破損した場合、そのまま使用せずすぐに使用を中止してください。

## 取り扱い上のご注意

- 本製品の電源を入れる前に音量を最小にしてからご使用ください。
- イヤホンのマイク部に手を近づけたり髪の毛などがかかると、「ピー」という音(ハウリング)がする場合があります。
- 乾燥した場所では、耳にビリビリと刺激を感じる場合があります。これは人体に蓄積された静電気によるもので、本製品の故障ではありません。
- 本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。必ずコードを巻き取って収納してください。
- コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 本製品の近くに発信機(携帯電話など)があるとノイズが入る場合があります。その場合は、離すようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。


## イヤピースについて

#### ●イヤピースのサイズについて

本製品は、4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属しており、お買い上げ時は、Mサイズが装着されています。サイズが合わない、または聞き取りにくい場合には、イヤピースのサイズを替えて、イヤピースの収まりのよい位置に調節してください。イヤピースが耳にうまく装着されていないと、「ピー」という音(ハウリング)が発生したり集音効果が実感できないことがあります。

#### ●交換のしかた

イヤピース装着部からイヤピースを外し、別のイヤピースを斜めから押し当てます。内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり取り付けてください。
※イヤピースが外れにくい設計にしているため、取り付けがきつくなっています。

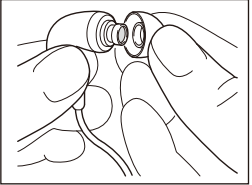

#### ⚠注意


- イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外してお手入れをしてください。
- イヤピースは消耗品のため、保存や使用により劣化します。イヤピース装着部から外れやすくなるなどの劣化が見られた場合、イヤピースを交換してください。交換イヤピースに関するご相談は、お買い上げ販売店、キングジム商品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。
- 一度外したイヤピースを本体につける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。イヤピースが耳の中に残ったまま放置すると、けがや病気の原因となります。

## お手入れのしかた

長くご使用していただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

#### ●イヤホン部について

乾いた布で汚れを拭いてください。特にイヤピース装着部(右図参照)は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。

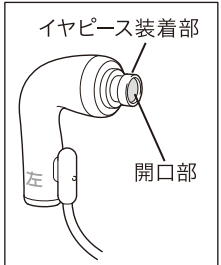

#### ●イヤピースについて

イヤホン部からイヤピースを外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は乾いてからご使用ください。

#### ●本体について

乾いた布で汚れを拭いてください。

#### ●コードについて

汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因となります。

## 主な仕様

外形寸法　： 本体：67×67×15mm (フック部・突起部含まず)
質量　　　： 約39g (電池含まず)
コード長　： 全長約107cm
電源　　　： 単4形アルカリ乾電池×1本 または 単4形エネルギー×1本 (別売)


電池寿命　： アルカリ乾電池使用時　最大40時間
エネルギー使用時　最大32時間
※使用環境・状況によって異なります。

形式　　　： エレクトレットコンデンサー型
指向特性　： 全指向性
周波数特性： 500Hz～4,000Hz
最大音響利得： 40dB
セット内容： 本体／イヤピース (XS,S,M,L) ／ポーチ／簡単マニュアル／取扱説明書 (保証書付)

動作環境　： 5～35℃、30～80% (非結露)
保存環境　： -10～55℃、5～80% (非結露)




## ■ 各部の名称と機能

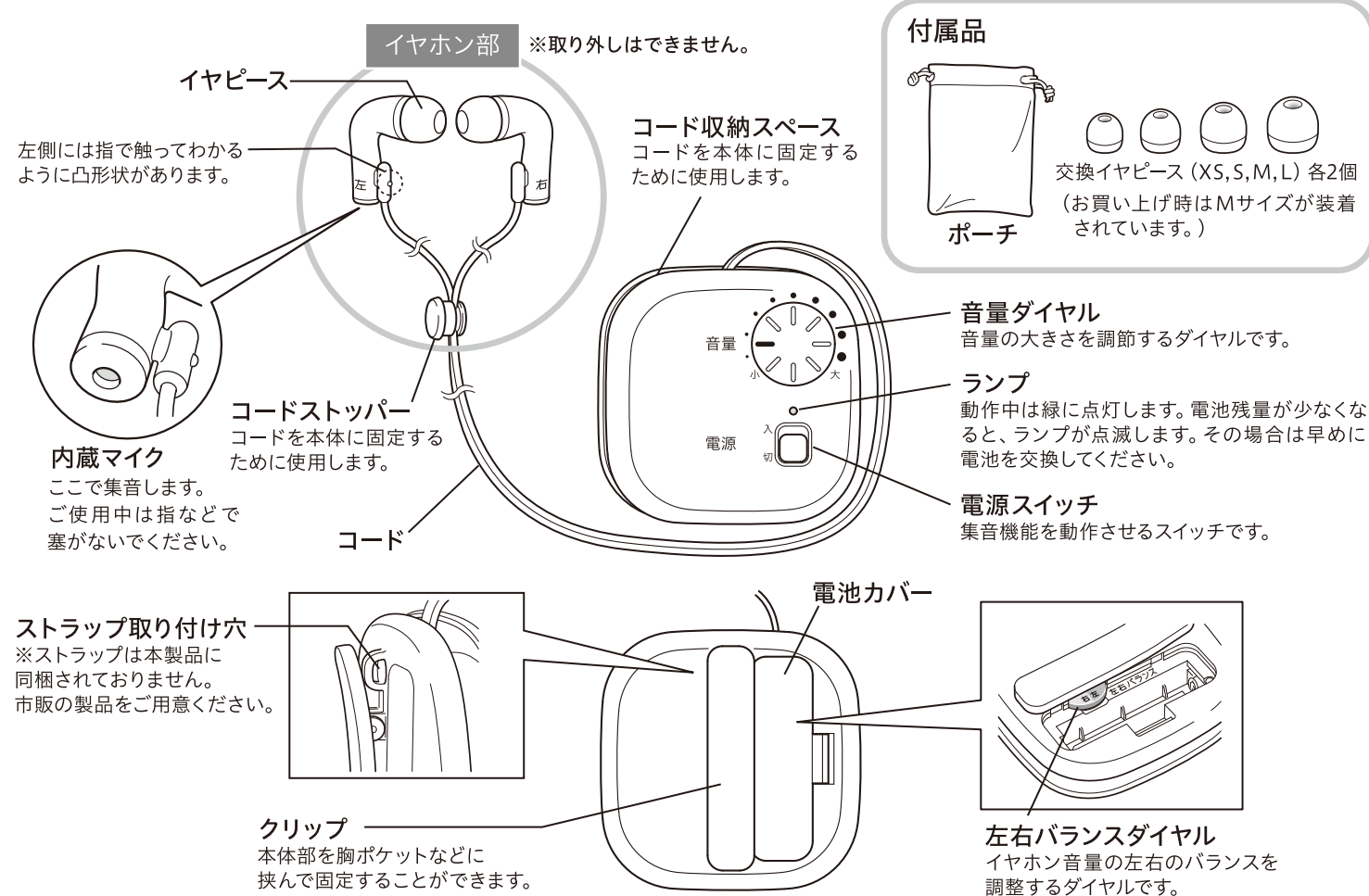

## ■ 電池の入れかた


電池を入れるときは、あらかじめ電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

- 1 本体裏側にあるツメを押し、電池カバーを開けます(①)。
- 2 +の極性表示に合わせて、一端子側から単4形電池(別売)1本セットします(②)。
- 3 電池カバーを閉めます(③)。

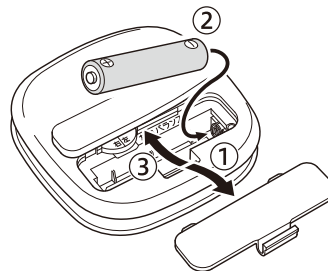

## ■ 左右の音量バランスを調節する

左右の聴こえ方に合わせて左右の音量バランスを調整することができます。電池カバーの中に調整する左右バランスダイヤルがあります。

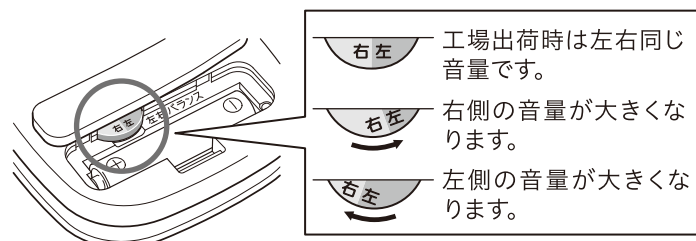


### MEMO

左右のバランスを調整する場合は、使用されるご本人に対して正面から話し掛けるようにして左右の調整をしてください。


## ■ クリップを使う

胸ポケットなどに留めて使用することができます。

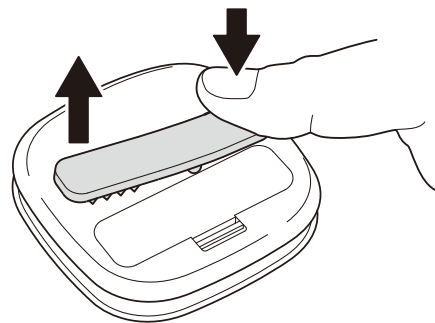

## ■ 首にかけて使う

ストラップを使用すると本体を首からさげて使用することができます。ストラップは本製品に同梱されておりません。市販の製品をご用意ください。

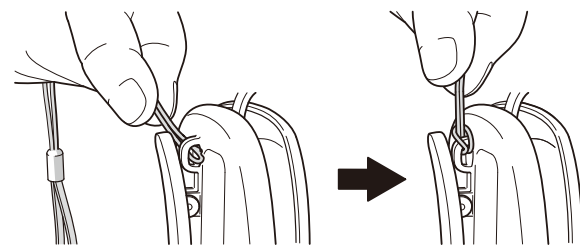


### ⚠️ 注意

ストラップが首に巻き付かないように注意してください。窒息の原因となることがあります。


## ■ 使いかた

- 1 電源が「切」になっていることを確認し、音量ダイヤルを反時計回り方向に回して「小」にします。

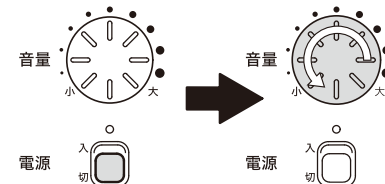


- 2 コードストッパーを本体から引き抜き、イヤホンコードを伸ばします。


※イヤホン部やコードではなくコードストッパーをつかんでください。

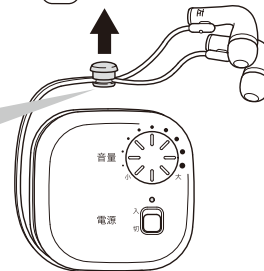

- 3 イヤホンコードの左右の長さがお好みの長さになるよう、コードストッパーの位置を調節します。

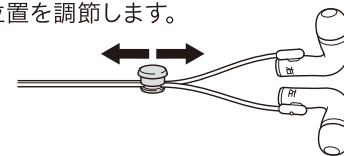

- 4 イヤホンを左右表示の通りに耳へ装着します。

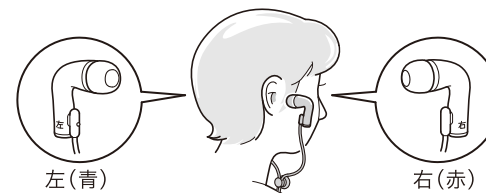


### MEMO

- ・イヤホン部の左側(青)には指で触って分かるように凸形状があります。
- ・イヤホン部が耳の奥へ入っていないとハウリング音(「ピー」という音)が発生しやすくなります。集音機能を効果的に得るために、イヤピースのサイズを確認し耳に隙間なく入れるようにしてください。

- 5 電源を「入」にします。


電源が入ると緑のランプが点灯します。

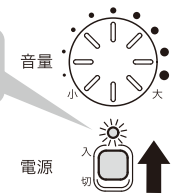

### ⚠️ 注意

イヤホン部に耳に装着する前に電源が「入」になっていると、ハウリング音が発生する場合があります。

- 6 音量ダイヤルを少しずつ時計回り方向に回して音量を調整します。

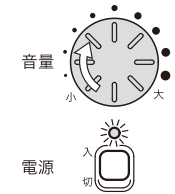

### MEMO

- ・時計回り方向に回すと、音量も大きくなります。
- ・本製品は、聞こえにくい音量を聞こえる音量に増幅させる機器です。音量を調整するときは、会話やテレビの音など周りの音を聞きながら調整してください。

### ⚠️ 注意


- はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。音量ダイヤルはゆっくり回して調整してください。
- イヤホン片方のみでのご使用时や電源が入ったままのイヤホンの着脱時、または使用中に耳を覆ったりすると、ハウリング音(「ピー」という音)が発生する場合があります。
- ハウリング音が発生したら音量を下げてください。

## ■ 使い終わったら

- 1 音量ダイヤルを反時計回り方向に回して音量を「小」にします。



- 2 電源を「切」にします。

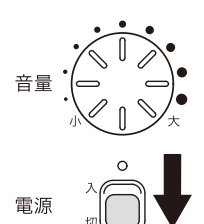


- 3 両耳からイヤホンを外します。

### ⚠️ 注意


イヤピースがイヤホンについているか確認してください。耳に残っているとそのままにすると、耳から取り出すことができなくなる危険性があります。

- 4 本体のコード収納スペースに入り込むように、イヤホンコードを巻き付けていきます(①)。その際、最後まで巻き取れるように、コードストッパーをイヤホン部の近くまでスライドさせて位置を調節してください(②)。

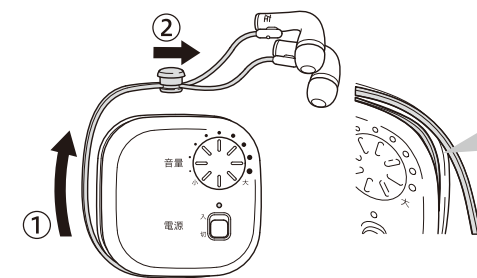

コード収納スペース溝にイヤホンコードが収まるように巻きつけます。  
※コードを強く引っ張らないでください。断線するおそれがあります。

- 5 コードストッパーを図のように本体に押し込み、イヤホンコードを固定してください。なお、本製品をご使用されない時は、付属のポーチに収納してください。

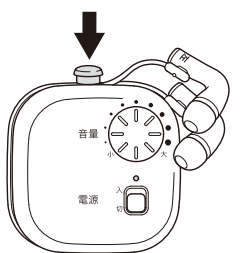

### ⚠️ 注意

正しく巻き付けないと、コードが断線するおそれがあります。

## ■ 故障かな?と思ったら

症状	対処
音が出ない	・電源を「入」にする。 ・電池の+と-の向きを本体内部の表示に合わせて正しく入れる。 ・新しい電池に交換する。
音が聞こえにくい	・音量ダイヤルを調整する。 ・新しい電池に交換する。 ・イヤホンの開口部が詰まっていれば掃除をする。 ・イヤホンの内蔵マイクが何かに覆われていないか確認する。 ・イヤピースが耳のサイズに合っているか確認する。
「ピー」と音がする(ハウリング)	・イヤピースが耳のサイズに合っているか確認する。 ・音量を下げる。 ・イヤホンの内蔵マイクが何かに覆われていないか確認する。
「サー」と音がする	・音量を上げていくと「サー」という音が大きくなりますが故障ではありません。
雑音がひどい	・イヤホンの内蔵マイクに髪の毛などが触れていないか確認する。